



AJIA MEDICAL

# Renuva

GUÍA DE

# PROTOCOS

Exclusivo para equipo Renuva

CryoShot

Fototipo	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------	--------------	----------

**I**

Bajo	25	350
Medio	30	300
Severo	35	300

**II**

Bajo	25	350
Medio	30	300
Severo	35	300

**III**

Bajo	25	300
Medio	30	250
Severo	35	250

**IV**

Bajo	20	250
Medio	25	200
Severo	30	200

**V**


Bajo	15	200
Medio	20	150
Severo	25	150

**VI**


Bajo	15	150
Medio	20	150
Severo	25	150

## Cabezales Recomendados

EffiTip 20x20

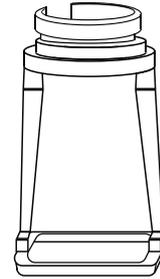

Ost-15

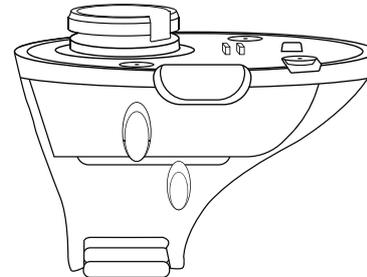

Estrías rojas

Fototipo	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------	--------------	----------

**I**

Bajo	30	350
Medio	35	300
Severo	40	300

**II**

Bajo	30	350
Medio	35	300
Severo	40	300

**III**

Bajo	30	300
Medio	35	250
Severo	40	250

**IV**

Bajo	25	250
Medio	30	200
Severo	35	200

**V**


Bajo	20	200
Medio	25	150
Severo	30	150

**VI**


Bajo	15	150
Medio	20	150
Severo	25	150

## Cabezales Recomendados

EffiTip 20x20

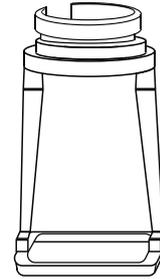

Ost-15

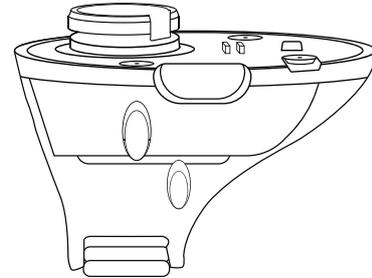

Estrías blancas

Fototipo	Grado de profundidad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------------------	--------------	----------




**I**

Epidérmico

30

350

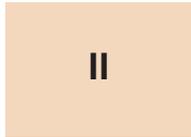


**II**

Epidérmico

30

350

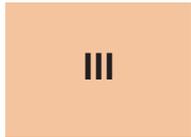

**III**

Epidérmico

30

300



**IV**

Epidérmico

25

250



**V**

Epidérmico

20

250



**VI**


Epidérmico

15


150

## Cabezales Recomendados

EffiTip 20x20

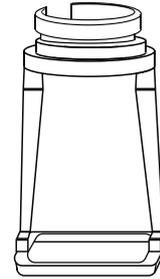

Ost-15

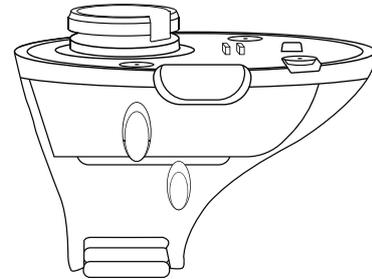

Pigmentación

Fototipo	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------	--------------	----------

**I**

Bajo	8	250
Medio	9	200
Severo	10	200

**II**

Bajo	8	250
Medio	9	200
Severo	10	200

**III**

Bajo	7	200
Medio	8	150
Severo	8	150

**IV**

Bajo	7	200
Medio	8	150
Severo	8	150

**V**


Bajo	5	150
Medio	5	100
Severo	6	100

**VI**

Bajo	5	150
Medio	5	100
Severo	6	100

Cabezales Recomendados

EffiTip 10x20

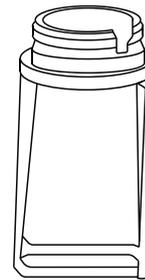

Fototipo	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------	--------------	----------




I

Bajo	35	350
Medio	40	350
Severo	45	300



II

Bajo	35	350
Medio	40	350
Severo	45	300

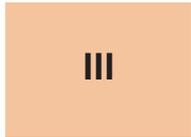

III

Bajo	30	350
Medio	35	350
Severo	40	300



IV

Bajo	25	250
Medio	30	200
Severo	35	200



V

Bajo	20	250
Medio	25	200
Severo	30	200




VI


Bajo	15	200
Medio	20	150
Severo	25	150

## Cabezales Recomendados

EffiTip 20x20

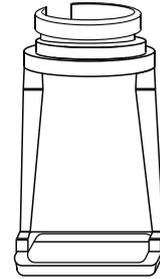

EffiTip 10x10

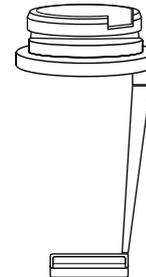

Tratamiento Atófico

Fototipo	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------	--------------	----------

**I**

Bajo	35	350
Medio	40	350
Severo	45	300

**II**

Bajo	35	350
Medio	40	350
Severo	45	300

**III**

Bajo	30	350
Medio	35	350
Severo	40	300

**IV**

Bajo	25	350
Medio	30	350
Severo	35	300

**V**


Bajo	20	300
Medio	25	300
Severo	30	250

**VI**


Bajo	15	250
Medio	20	200
Severo	25	200

## Cabezales Recomendados

EffiTip 20x20

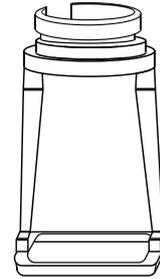

EffiTip 10x10

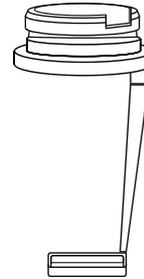

Tratamiento Plano

Fototipo	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------	--------------	----------

**I**

Bajo	25	350
Medio	35	350
Severo	45	300

**II**

Bajo	25	350
Medio	35	350
Severo	45	300

**III**

Bajo	20	300
Medio	30	300
Severo	40	250

**IV**

Bajo	20	250
Medio	25	250
Severo	30	200

**V**


Bajo	20	250
Medio	25	250
Severo	30	200

**VI**


Bajo	15	200
Medio	20	200
Severo	25	150

## Cabezales Recomendados


EffiTip 20x20

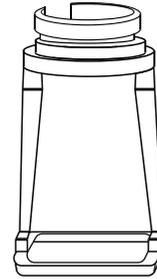

EffiTip 10x10

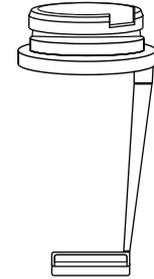

Ost-15

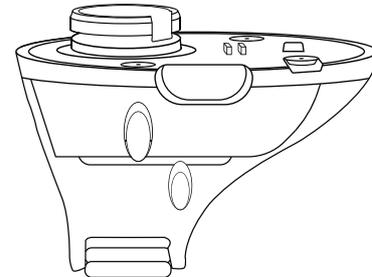

Rejuvenecimiento

Fototipo	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	----------	--------------	----------

I	Bajo	25	350
	Medio	35	350
	Severo	45	300

II	Bajo	25	350
	Medio	35	350
	Severo	45	300

III	Bajo	20	300
	Medio	30	300
	Severo	40	250


IV	Bajo	20	250
	Medio	25	250
	Severo	30	200

V	Bajo	20	200
	Medio	25	150
	Severo	30	150


VI	Bajo	15	200
	Medio	20	150
	Severo	25	150

## Cabezales Recomendados

EffiTip 10x10

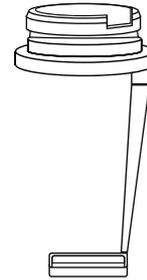

Ost-7

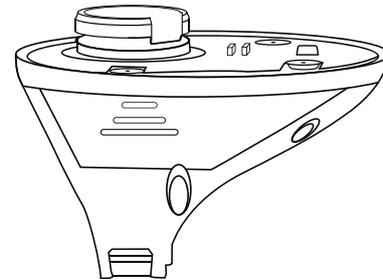

Arrugas periorbitales

Fototipo	Tipo de cicatriz	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	------------------	----------	--------------	----------


Cabezales Recomendados



I	Laminación	Templado	20	350
		Medio	30	350
		Severo	40	300
	Furgon	Templado	25	350
		Medio	35	300
		Severo	45	300
	Picahielo	Templado	35	300
		Medio	45	250
		Severo	50	200




II	Laminación	Templado	20	350
		Medio	30	350
		Severo	40	300
	Furgon	Templado	25	350
		Medio	35	300
		Severo	45	300
	Picahielo	Templado	35	300
		Medio	45	250
		Severo	50	200

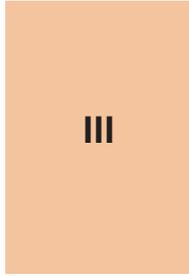

III	Laminación	Templado	15	350
		Medio	25	350
		Severo	35	300
	Furgon	Templado	20	350
		Medio	30	300
		Severo	40	300
	Picahielo	Templado	30	300
		Medio	40	250
		Severo	45	200

EffiTip 20x20

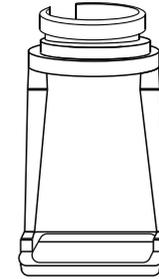

EffiTip 10x10




Fototipo	Tipo de cicatriz	Gravedad	Energía (Mj)	Densidad
----------	------------------	----------	--------------	----------

Cabezales Recomendados

**IV**

Laminación	Templado	25	350
	Medio	25	350
	Severo	35	300
Furgon	Templado	20	350
	Medio	30	300
	Severo	40	300
Picahielo	Templado	30	300
	Medio	40	250
	Severo	45	200


EffiTip 20x20

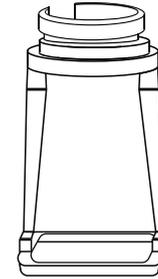

**V**

Laminación	Templado	15	300
	Medio	20	250
	Severo	25	200
Furgon	Templado	20	250
	Medio	25	200
	Severo	30	150
Picahielo	Templado	25	200
	Medio	30	150
	Severo	35	150

EffiTip 10x10

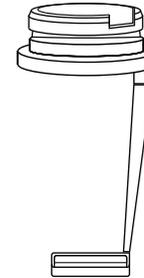

**VI**


Laminación	Templado	20	250
	Medio	25	200
	Severo	20	150
Furgon	Templado	25	200
	Medio	30	150
	Severo	25	150
Picahielo	Templado	30	150
	Medio	35	150
	Severo	20	150

Cicatriz Acné


Fototipo	Grado de profundidad	Energía (Mj)	Densidad
I	Epidermis	25	450
	Intersección dermis-epidermis	30	400
	Dermis	35	400
II	Epidermis	25	450
	Intersección dermis-epidermis	30	400
	Dermis	35	400
III	Epidermis	20	450
	Intersección dermis-epidermis	25	400
	Dermis	30	400
IV	Epidermis	15	350
	Intersección dermis-epidermis	20	300
	Dermis	25	300
V	Epidermis	10	300
	Intersección dermis-epidermis	15	250
	Dermis	20	250
VI	Epidermis	10	250
	Intersección dermis-epidermis	15	200
	Dermis	20	200

## Cabezales Recomendados

EffiTip 20x20

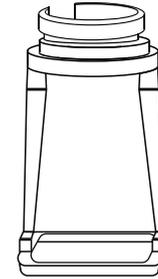

EffiTip 10x10

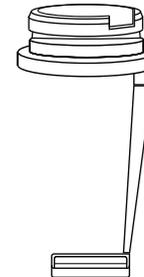

Melasma