


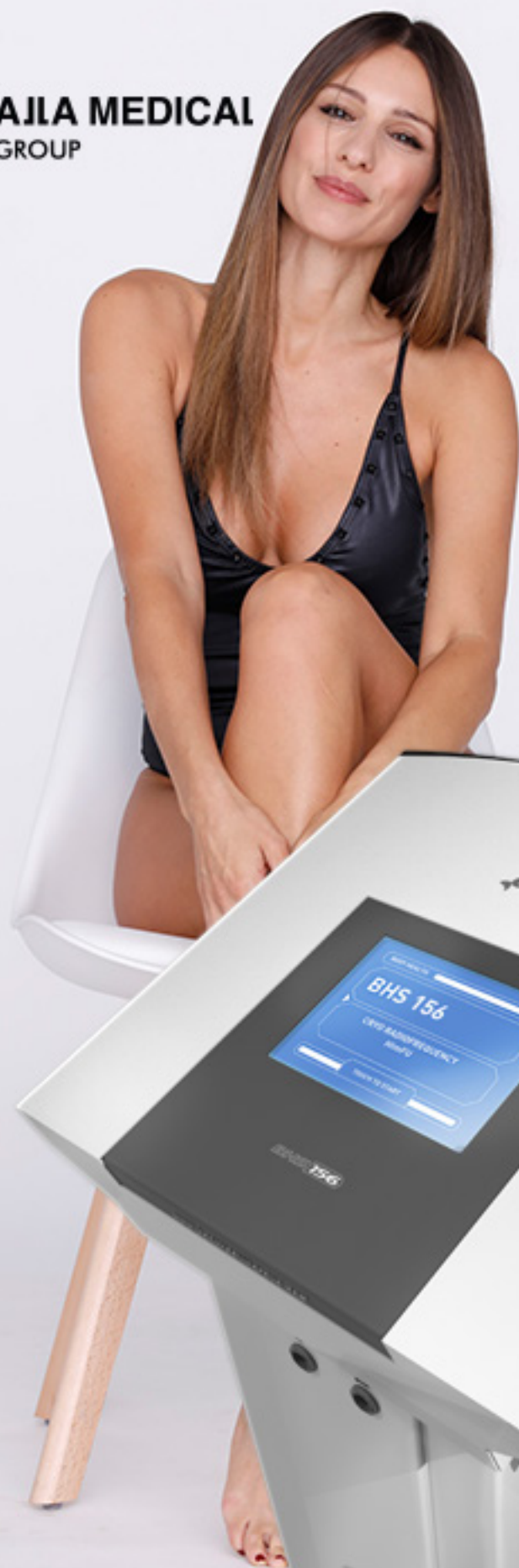


AJLA MEDICAL
GROUP



 **BODY HEALTH**
Chile

BHS 156
Enygma





AJLA MEDICAL
GROUP



Con BHS 156 ENYGMA, es posible combinar tres excelentes tratamientos desarrollados exclusivamente por Body Health, como CrioFrecuencia, HImFU corporal y ENYGMA. Es un equipo fácil de manipular y ofrece la posibilidad de utilizar tratamientos corporales y faciales.

TRATAMIENTOS REALIZABLES:

CrioFrecuencia

Flacidez, Arrugas y líneas de expresión, Adiposidad, Celulitis, Modelado corporal.

HImFU

Adiposidad localizada, Modelado corporal, Celulitis.


Enygma

Rejuvenecimiento íntimo femenino (no invasivo), incontinencia urinaria, disfunción sexual

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES:

BHS 156 Veneri

CrioFrecuencia - HImFU

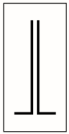


CrioFrecuencia

La CrioFrecuencia es una terapia segura y no invasiva que combina la transmisión de frío (-25°C) desde el cabezal a la dermis, provocando un calentamiento interno de los tejidos corporales (más de 55°C) causado por las ondas de radiofrecuencia multipolar.

Esta combinación de frío y calor causa un shock térmico que estimula la síntesis de nuevas fibras de colágeno y elastina produciendo un efecto lifting instantáneo, progresivo y de larga duración en una sola sesión.


Lifting facial y corporal **instantáneo**

La CrioFrecuencia del BHS 156 VENERI es única, debido a que puede llegar a entregar hasta 1.050 Watts de potencia, controlado con su sistema criógeno a base de agua.

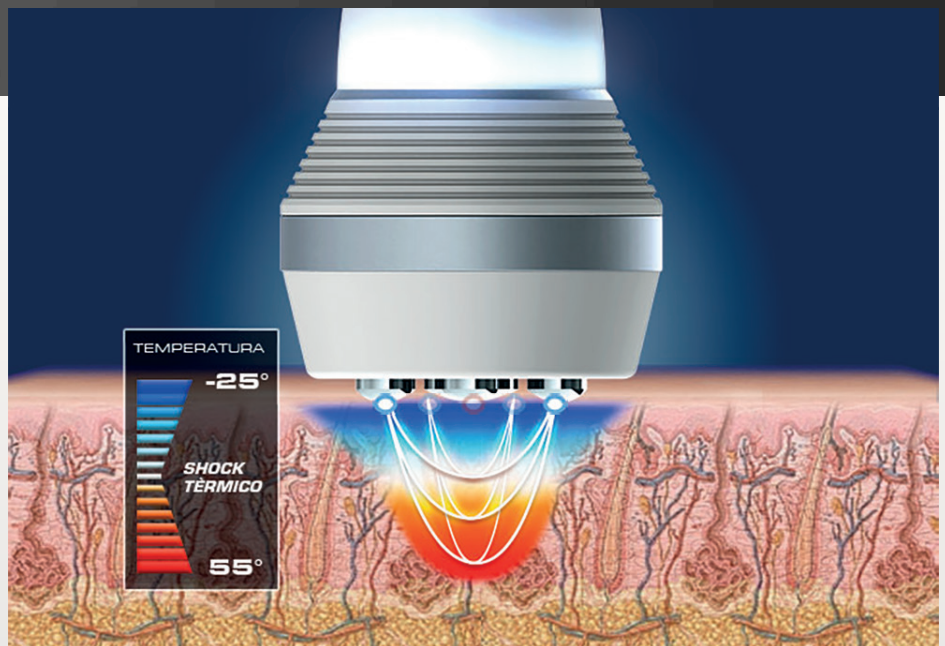

La tecnología CrioFrecuencia nos permite entregar la energía de forma Multipolar, Monopolar y la combinación de ambas según los objetivos terapéuticos del profesional tratante, las cuales permiten entregar una potencia jamás vista en otros sistemas de ondas electromagnéticas. Es rápida, segura, indolora, placentera y por sobre todo, eficaz en los resultados, lo que produce una mayor adherencia del paciente a su tratamiento con CrioFrecuencia.




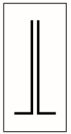

AJLA MEDICAL
GROUP

BHS 156
Enygma


tecnología
**única,
patentada,
garantizada.**

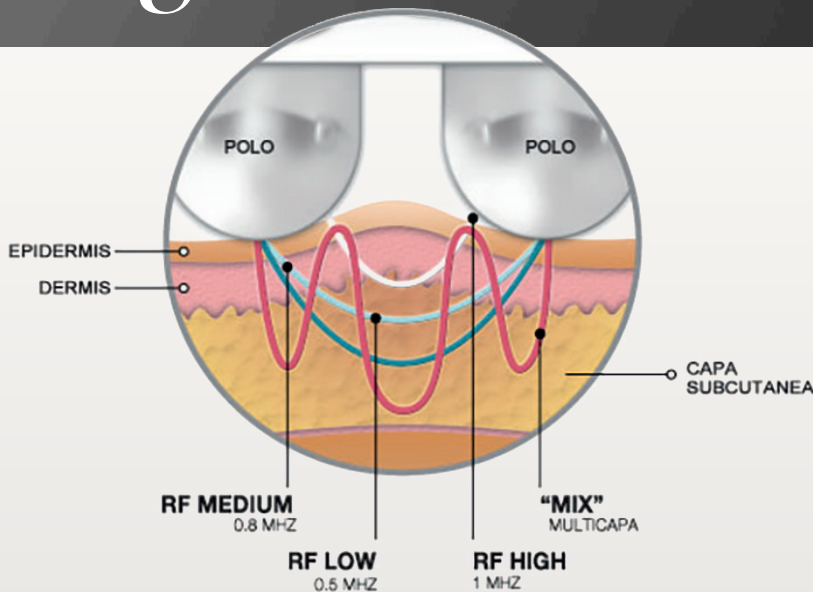

CrioFrecuencia⁺ Multifrecuencial

La Multifrecuencia tiene la ventaja de ofrecer distintos canales de frecuencia. HIGH / MEDIUM / LOW y MIX que combina las 3 primeras, permitiendo realizar una aplicación más homogénea. Cada canal de frecuencia está orientado con precisión a una profundidad de penetración específica, según los objetivos terapéuticos.




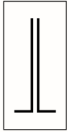

HImFU




HImFU Corporal es una terapia avanzada, no invasiva, única para el tratamiento de la adiposidad localizada. Utiliza ondas de ultrasonido multifocal que provocan un efecto termomecánico en el tejido adiposo causando su destrucción. Los pacientes pueden reducir entre 1 y 3 cm de contorno por sesión obteniendo un increíble efecto de remodelado corporal.

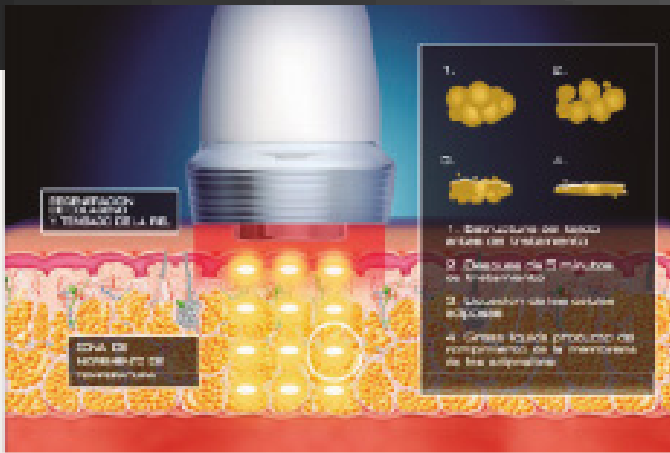

Potencia del aplicador

La tecnología HImFU dispone de un transductor que trabaja a 2.9 Mhz entregando una energía MULTIFOCAL a 2,5 centímetros de profundidad, preservando las capas mas superficiales de la piel y mejorando la calidad de la misma.

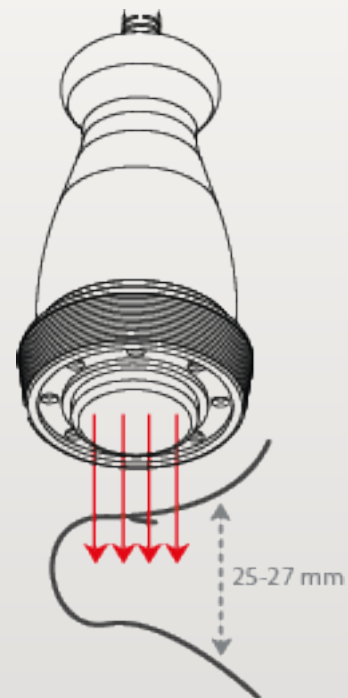



Enygma

Enygma X-Orbital es lo último en tecnología de Radiofrecuencia, segura, rápida y no ablativa para el rejuvenecimiento íntimo en 360°, un gran avance en el tratamiento de la hiperlaxitud vaginal.

Cuenta con aplicadores dedicados a acciones específicas en el tratamiento, además, de una estación de desinfección y esterilización.



Beneficios e Indicaciones

SIN CONSUMIBLES, ECONÓMICO, RENTABLE


No invasivo, indoloro, sin requerimientos de anestesia, ambulatorio y apto para pacientes con DIU.

- RESTAURA LA ELASTICIDAD VAGINAL
- MEJORA LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO
- MEJORA LA VAGINITIS ATRÓFICA
- REDUCCIÓN DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL

APLICADOR INTERNO
Tratamiento canal vaginal

El aplicador interno posee 4 aros con acción 360° que pueden ser ajustados para funcionar simultáneamente o de forma aislada.



APLICADOR EXTERNO
Tratamiento vulvar

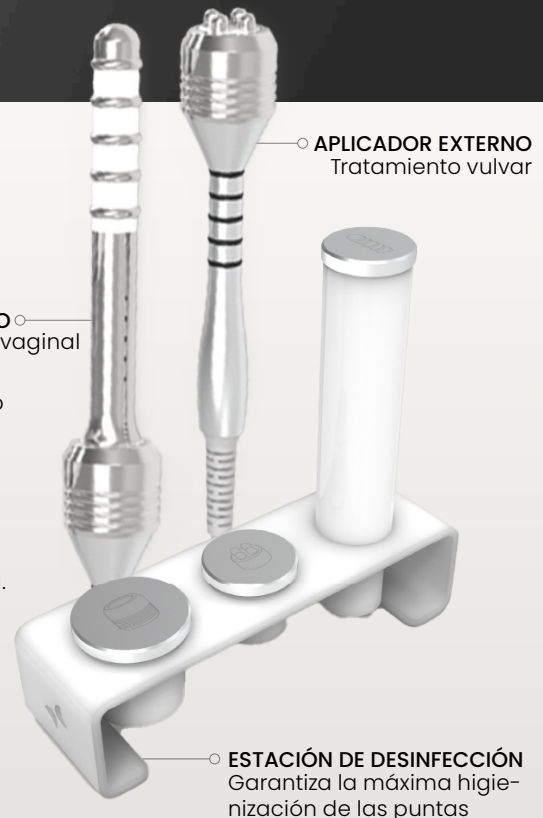

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
Garantiza la máxima higienización de las puntas



ANTES


DESPUÉS

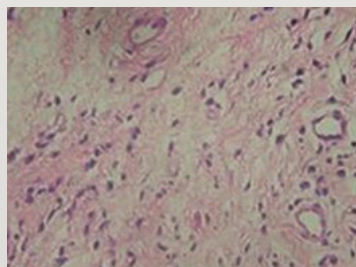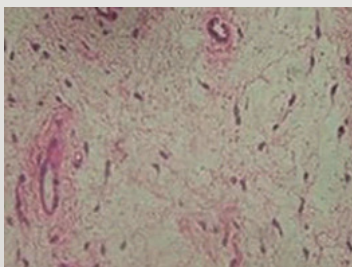

ANTES

DESPUÉS

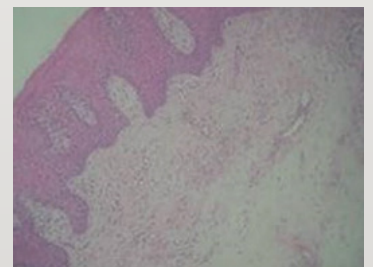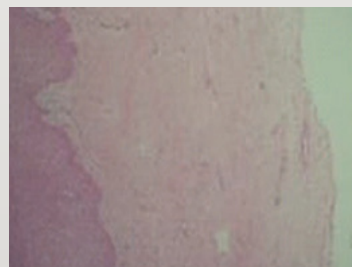

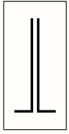

AJLA MEDICAL
GROUP

BHS 156
Enygma

FABRICANTE BODY HEALTH GROUP

NOMBRE DEL PRODUCTO BHS 156 ENYGMA

CLASE CLASE I

ANCHO 37 Cm

LONGITUD 36 Cm

ALTURA 105 Cm

PESO 30 Kg

CERTIFICADO CE, FCC, ISO 9001, ISO 13485

VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL 220 Vac

VOLTAJE DE ENTRADA MINIMO 198 Vac

VOLTAJE DE ENTRADA MAXIMO 240 Vac

ENERGIA DE ENTRADA MAXIMO 600 VA

ENERGIA DE ENTRADA NOMINAL 440 VA

FRECUENCIA PRINCIPAL 50-60 HZ

FUSIBLES 2x F10AL250V (FUSE SLOW 10A 250VAC 5X20MM)

ELECTRONICA MICROPROCESOR CONTROLLED

TEMPERATURA 10°C A 45°C

HUMEDAD 90% MAX

HIMFU

SALIDA: FLOTANTE AISLADA TIPO BF (IEC 60601-1)

EMISOR: TITANATO DE BARIO

PARTE DE APLICACION A PACIENTE: ACERO QUIRURGICO

OSILACION DE FRECUENCIA: 2.9 MHZ

ENERGIA DE SALIDA: 45 WATT/ CM2

AJUSTE DE TIEMPO: 0 A 99 MINUTOS

AJUSTE DE ENERGIA: 10 a 100%, PASO 10%

SECUENCIA: 5 A 60 SEC ON / 5 SEG OFF

CICLO DE TRABAJO: 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30

MODULACION DE FRECUENCIA: 5 / 15 / 30 / 60

LED COLOR: ROJO

LONGITUD DE ONDA: 624 nm

APERTURA DE LUZ: 15° (CADA LED)

ENERGIA DE LED: 320mW

ENERGIA DE LUZ: 142000 mcd

CORRIENTE MAXIMA: 40 mA

SECUENCIA DE LEDS: OFF/LOW/HIGH/CONTINUOS

CRIOFRECUENCIA

FRECUENCIA: 500kHz / 800kHz / 1MHz / MIX

PARTE DE APLICACION A PACIENTE: ACERO QUIRURGICO. SEIS DE 12mm, UNO DE 20mm

LIMITE DE TEMPERATURA: -5°C / -10°C / MAX COLD

TEMPERATURA TIPICA AL MAX: -25°C

AJUSTE DE TIEMPO: 0 A 99 MINUTOS

AJUSTE DE ENERGIA: 0 A 100%, PASO 5%

TRATAMIENTOS CON CRIO: CUERPO/CARA

MODOS CON CRIO: MULTIPOLAR/MONOPOLAR/MIX

TRATAMIENTOS SIN: CRIO OJOS

MODOS SIN CRIO: TRIPOLAR/BIPOLAR

ENYGMA

FUSIBLES: 6 AMP / 250 V

POTENCIA: 420 WATTS

CONTROLADO POR: MICROPROCESADOR

TEMPERATURA: 10° A 45° C

HUMEDAD 80% MAX

TIMER: 0 A 99 MINUTOS

GABINETE: METÁLICO

ACCESORIOS: ACERO QUIRÚRGICO Y TEFLÓN

EMISOR: X-ORBITAL



www.alla-medical.cl

Ricardo Matte Pérez, 484

Región Metropolitana, Santiago

*Imágenes referenciales / Ficha técnica modificable sin previo aviso