



AJIA MEDICAL
GROUP


IBRAMED
CHILE

Plasmed





PLASMED es un generador de descarga de plasma por corriente continúa, en donde al acercarse al tejido, la corriente eléctrica romperá el aislamiento dieléctrico del aire y produciendo la descarga de rayo de plasma. Este fenómeno produce un aumento de temperatura en la región aplicada, generando así la lesión tisular deseada.

VERSATILIDAD DE TRATAMIENTOS

¡UN SOLO EQUIPO, MÚLTIPLES ALTERNATIVAS!

TRATAMIENTOS REALIZABLES:

Rejuvenecimiento facial y mejoría de arrugas

Tratamiento para estrías y cicatrices atróficas

Flaccidez cutánea facial y corporal


Flaccidez palpebral (párpado caído)

Tratamiento de hiperpigmentación cutánea

Remoción de pequeñas verrugas y acrocordones

Aumento microcirculación

Permeabilización de activos en la piel

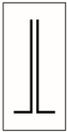

Corriente **continua**

Al generar plasma a través de corriente continua, lograremos:

Un proceso inflamatorio menor y, por lo tanto, menor riesgo de hiperpigmentación.

El paciente siente menos molestias y menos edema después del procedimiento.


Descarga de plasma generada entre la piel y la puntera MÁS estable, con un efecto deseado a menor diámetro.

Permite la producción de lesiones superficiales o profundas de la piel.

PLASMED

DOBLE MODO DE APLICACIÓN

Aplicación **continua** y **pulsada** con emisión directa de plasma cada vez que acercamos la puntera a la piel, y PULSADA, con emisión programada en segundos (on y off), donde el profesional elige el tiempo de emisión del rayo y el tiempo de espera del equipo, logrando lesiones simétricas en diámetro y profundidad.

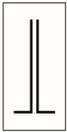

9 PUNTERAS A ELEGIR

PLASMED es el único equipo que presenta 9 punteras distintas (4 puntas de fulguración y 5 puntas de contacto) permitiendo **4 técnicas de aplicación**, ya sean faciales o corporales.

Aplicación por fulguración Puntual

Se utiliza para promover una lesión puntual por cauterización en el tejido, con pequeños puntos de coloración blanca (desnaturalización del tejido) que indica una lesión más superficial, y/o marrón (cauterización del tejido) que indica una lesión más profunda (Puntas más finas permiten una lesión más profunda, y puntas más gruesas una lesión más superficial).

Aplicación de fulguración por Barrido

Tratamiento intensivo para desnaturalización del tejido.

Aplicación dinámica por contacto


Se utiliza para promover el aumento de la circulación sanguínea local, y lesiones pequeñas y superficiales. El área de tratamiento debe mostrar hiperemia leve (La potencia será proporcional al tamaño de la puntera).

Peeling de Plasma

Tratamientos rejuvenecimiento, se utiliza para promover el aumento de la circulación sanguínea, y así tener mayores resultados con la permeación de activos.

9 NIVELES DE ENERGÍA

Con PLASMED puedes elegir entre 9 niveles de energía de emisión de plasma, permitiendo un tratamiento seguro en distintos fototipos de piel y variabilidad en aplicaciones.

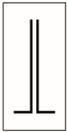

Tipos de punteras.



Punta Curva

Fulguración puntual

Indicado para:

- Flacidez del párpado
- Arrugas en zonas curvas
- Líneas de expresión



Punta Recta

Fulguración puntual

Indicado para:

- Arrugas
- Líneas de expresión



Punta de Aguja

Fulguración puntual

Indicado para:

- Flacidez del párpado
- Arrugas
- Líneas de expresión
- Acrocordones



Punta de Cono

Fulguración puntual y barrido

Indicado para:

- Hiperpigmentación
- Flacidez de la piel



Punta P

De contacto

Indicado para:

- Flacidez del párpado
- Arrugas periorbitales



Punta M

Sugerencia de contacto

Indicado para:

- Surco nasogeniano



Punta G

Sugerencia de contacto

Indicado para:

- Región frontal



Punta Disco Pequeño

De contacto facial o corporal

Indicado para:

- Estrías
- Cicatrices atrófica
- Permeación de activos




Punta Disco Grande

De contacto facial o corporal

Indicado para:

- Flacidez de la piel
- Estrías
- Permeación de activos



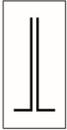


Único con **espaciadores.**

PLASMED incluye 3 espaciadores, los cuales se incorporan en las punteras de fulguración, fueron desarrollados para que al momento de la aplicación se mantenga una distancia constante entre la piel y la punta, ayudando a lograr lesiones simétricas y controlar los temblores naturales de las manos, generando mayor seguridad y precisión en la aplicación.



SIN CONSUMIBLES

Todas las puntas y espaciadores se pueden desinfectar con alcohol 70° e incluso someter a autoclave, proporcionando un bajo costo operacional, sin descuidar la seguridad de tus pacientes.

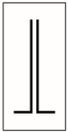

AJLA MEDICAL
GROUP


Plasmed

Contigo
A donde vayas.



PLASMED es el equipo más compacto en su categoría, debido a su liviano peso y pequeño tamaño. Su batería interna, permite su uso sin necesidad de enchufes o cables conectados a la fuente eléctrica. Su sistema de seguridad de batería monitoreada, avisará cuando se está agotando, permitiendo también así su uso, de ser necesario, enchufado a la corriente.

Incluye un elegante bolso transportable, que protege el equipo y sus accesorios al momento de trasladarlo.

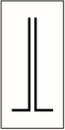

FABRICANTE: IBRAMED

NOMBRE DEL PRODUCTO: Plasmed

Corriente Continúa

Pantalla LCD

Teclas touch

1 Canal de salida

Incluye kit completo punteras

Incluye bolso portátil

Consumo: - Voltaje 100- 240v

Potencia 1,2 W

DIMENSIONES:


Largo: 21.9cm

Ancho: 3.9cm

Altura: 3,4 cm

Peso: 0,160 kg



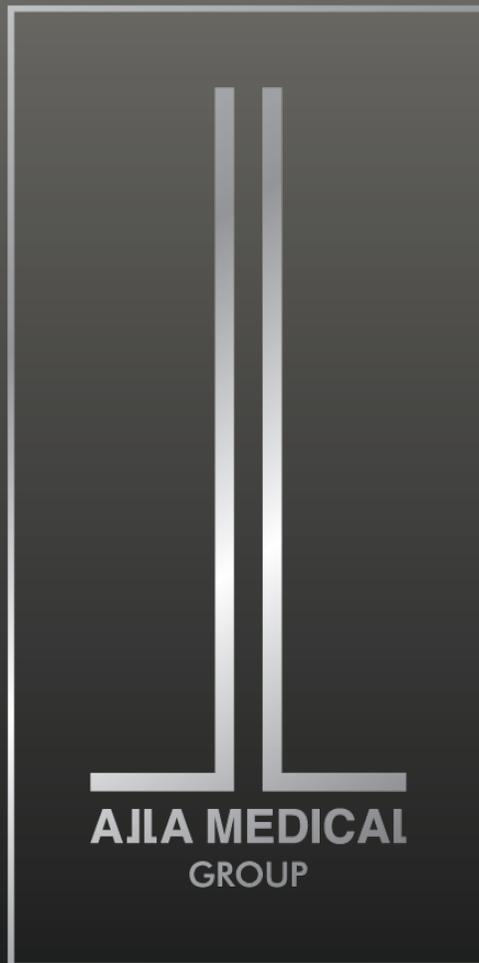

www.alla-medical.cl / www.plasmed.cl

Ricardo Matte Pérez, 484

Región Metropolitana, Santiago

*Imágenes referenciales / Ficha técnica modificable sin previo aviso